



NP-1000 Nexprobe® Image-guided Probe for use with the Nexframe® Stereotactic System and Medtronic StealthStation® Navigation Systems / Sonde assistée par imagerie médicale Nexprobe® Modèle NP-1000 pour utilisation avec le système stéréotaxique Nexframe® et les systèmes de navigation StealthStation® de Medtronic / Bildgeführte Sonde NP-1000 Nexprobe® zur Verwendung mit dem stereotaktischen System Nexframe® und den StealthStation® Navigationssystemen von Medtronic / Sonda guiada por imagen Nexprobe® Modelo NP-1000 para el uso con el sistema estereotático Nexframe® y sistemas de navegación StealthStation® de Medtronic / Nexprobe®-camerasonde Model NP-1000 voor gebruik met stereotactisch Nexframe®-systeem en StealthStation®-navigatiesystemen van Medtronic / Sonda a guida ad immagini Nexprobe® modello NP-1000 per l'utilizzo con il sistema stereotattico Nexframe® ed i sistemi di navigazione StealthStation® della Medtronic / NP-1000 Nexprobe® bildestyrt probe til bruk sammen med det stereotaktiske systemet Nexframe® og StealthStation®-navigeringssystemer fra Medtronic / Nexprobe® Image-guided Probe, modell NP-1000, är avsedd för användning med Nexframe® stereotaktiska system och Medtronic StealthStation®-navigationssystem / Μηλη απεικονιστικής καθοδήγησης NP-1000 Nexprobe® για χρήση με το στερεοτακτικό σύστημα Nexframe® και το σύστημα πλοήγησης StealthStation® της Medtronic / Nexprobe® bildestyrt guide, NP-1000 til brug sammen med Nexframe® stereotaktisk system og Medtronic StealthStation® navigationssystemer / Sonda orientada por imagem Nexprobe® NP-1000 para utilização com o sistema estereotático Nexframe® e os sistemas de navegação StealthStation® da Medtronic / Sonda prowadzona na podstawie obserwacji obrazu Nexprobe® model NP-1000 do stosowania z systemem stereotaktycznym Nexframe® oraz systemami neuronawigacji StealthStation® firmy Medtronic / NP-1000 Nexprobe® képzévezérelt szonda a Nexframe® sztereotaxiás rendszerrel és a Medtronic StealthStation® navigációs rendszerével való használatra / Sonda s obrazovou navigaci Nexprobe® NP-1000 určená k použití se stereotaktickým systémem Medtronic Nexframe® a s navigačními systémy StealthStation® Medtronic / Видеуправляемый датчик Nexprobe® NP-1000 для использования со стереотактической системой Nexframe® и навигационными системами Medtronic StealthStation® / Nexframe® Stereotaktik Sistem ve Medtronic StealthStation® Navigasyon Sistemleri ile kullanıma yönelik NP-1000 Nexprobe® Görüntü Kilavuzlu Sonda / Sonda s obrazovou navigáciou NP-1000 Nexprobe® určená na použitie so stereotaktickým systémom Nexframe® a navigačnými systémami Medtronic StealthStation®

Contents:

Contenu / Inhalt / Contenido / Inhoud / Contenuto / Innhold / Innehåll / Περιεχόμενα / Indhold / Conteúdo / Tartalom / Zawartość / Obsah / Содержимое / Obsah / İçindekiler

NP-1000 Nexprobe, 11,5-mm Passive Reflective Spheres (8) / Nexprobe Modèle NP-1000, Sphères réfléchissantes passives de 11,5 mm (8) / NP-1000 Nexprobe, passive reflektierende Kugeln (11,5-mm) (8) / Nexprobe® Modelo NP-1000, esferas reflectantes (8) de 11,5 mm / Nexprobe Model NP-1000, kogels van 11,5 mm (8) / Nexprobe NP-1000, sfere riflettenti prive di spie LED da 11,5 mm (8) / NP-1000 Nexprobe, 11,5 mm passive refleksjonskuler (8) / NP-1000 Nexprobe, passivt reflekterande kulor 11,5 mm (8) / NP-1000 Nexprobe, ανακλαστικά σφαίριδια διαμέτρου 11,5 mm (8) / Nexprobe, 11,5 mm passivt reflekterende sfærer (8), NP-1000 / Nexprobe NP-1000, esferas reflectores passivas de 11,5 mm (8) / Sonda Nexprobe model NP-1000, znaczniki kuliste o średnicy 11,5 mm odbijające światło, pasywne (8) / NP-1000 Nexprobe, 11,5 mm-es passzív tükröző gömböckel (8) / Nexprobe NP-1000, 11,5 mm pasívni reflexní kuličky (8) / NP-1000 Nexprobe, 11,5-мм пассивно отражающие сферы (8) / NP-1000 Nexprobe, 11,5 mm Pasif Reflektif Sterler (8) / Sonda NP-1000 Nexprobe, pasívne reflexné sféry s rozmermi 11,5 mm (8)

FHC, Inc.
1201 Main Street
Bowdoin, ME 04287 USA
www.fh-co.com

EC REP FHC Europe
(TERMOBIT PROD srl)
11 Dinu Vintila Str, 3rd Floor
Bucharest 021101 Sector 2
Romania

REF NP-1000
LOT 3113DDDDYYzxh

! Rx only I USA MD MR
STERILE EO 2 STRIKE

2024-10-18
2025-10-18

M927664A002B